



## Principales substances interférentes avec l'Electrophorèse des Protéines Sériques

Substance interférente (SPECIALITÉ)	Localisation de l'anomalie sur l'électrophérogramme
Meglumine amidotrizoate ( <i>UROGRAFIN</i> )	Milieu des alpha-2
Meglumine ioxitalamate ( <i>TELEBRIX</i> )	Milieu des alpha-2
Iohexol ( <i>OMNIPAQUE</i> )	Milieu des alpha-2
Meglumine iotroxate ( <i>BILISCOFIN</i> )	Préalbumine
lobitridol ( <i>XENETIX</i> )	Milieu des alpha-2
Iopamidol ( <i>IOPAMIRON</i> )	Milieu des alpha-2
Iopromide ( <i>ULTRAVIST</i> )	Milieu des alpha-2
Meglumine ioxaglate ( <i>HEXABRIX</i> )	Milieu des bêta-2
Ioversol ( <i>OPTIJECT</i> )	Milieu des bêta-2
Iomeprol ( <i>IOMERON</i> )	Milieu des bêta-2

**Tableau 1.** Principaux produits de contraste interférant à l'électrophorèse des protéines sériques

Substance interférente (SPECIALITÉ)	Localisation de l'anomalie sur l'électrophérogramme
Dextran ( <i>RHEOMACRODEX</i> )	Petit pic supplémentaire dans la zone des gammaglobulines
Gélatine ( <i>GELOFUSINE, PLASMION</i> )	Bande diffuse dans la zone des gammaglobulines
Gélatine ( <i>GELOPLASMA</i> )	Bande diffuse dans la zone des gammaglobulines mais pouvant s'étendre bêta-globulines
Amidon ( <i>VOLUVEN, HAES-steril</i> )	Pas d'interférence

**Tableau 2.** Principaux produits de remplissage interférant à l'électrophorèse des protéines sériques