



Suivi Dosage de Méthotrexate après administration de **VORAXASE** (Antidote du Méthotrexate)

Le Voraxase est destiné à métaboliser le Méthotrexate en cas de surdosage massif.
L'administration de Voraxase nécessite un suivi du méthotrexate par HPLC pour distinguer la molécule mère du métabolite le DAMPA.
Les techniques en immuno analyse (IA) dosent la somme MTX + DAMPA.
En garde et le WE, seul le dosage sur automate d'IA est possible => en tenir compte pour l'interprétation du résultat. Le DAMPA est présent durant 48 à 72 heures.

Etiquette patient

Ne pas oublier d'horodater la feuille

Prescripteur :

Préleveur :

Voraxase administré le : à :

1^{er} dosage : à J3 de l'administration du Voraxase
Transmettre le prélèvement rapidement

Date Prélèvement :

Heure Prélèvement :

Dialyse : ☐ NON ☐ OUI ; indiquer l'heure de fin de dialyse :

AU LABORATOIRE

Saisir **METHO + ENVEXDIPHA + PHAUTRE**

Centrifuger, aliquoter et **Congeler rapidement** Heure : Initiales opérateur :

Doser le Méthotrexate sur le reste de prélèvement (tube primaire) et saisir la valeur dans Molis.
Attention, en IA, on dosera aussi le DAMPA (durant 48 à 72h).

T
R
I

T
E
C
H
N
I
Q
U
E